

Caso clínico Clinical Case

1

Fase Quirúrgica / Surgical Phase

Colaboración / Collaboration:
Dr. Víctor Cubillo Blasco

Clínica Artedental - Tenerife



Género: Femenino

- Tratamiento: Colocación de Implante All on six
- Tipo y talla de implante: Zinic[®]MT
- 17 y 27 ø 3,60*13mm
- 14, 12, 22, 24 ø 3,6*11,5 mm

- Gender: Female
- Treatment: All on six technique
- Type and Implan size: Zinic[®]MT
- 17 y 27 ø 3,60*13mm
- 14, 12, 22, 24 ø 3,6*11,5 mm



Zinic[®]MT

Colocación de implantes Zinic MT - All-on-six / Placement of Zinic MT implants - All-on-Six



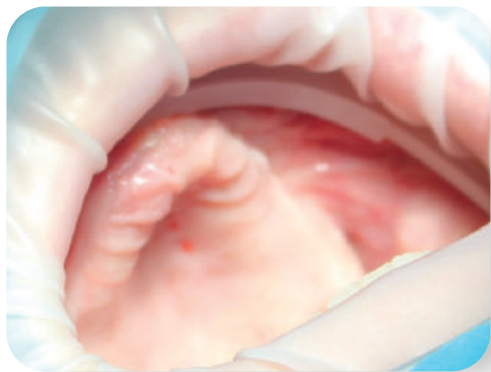




Foto inicial / Initial picture

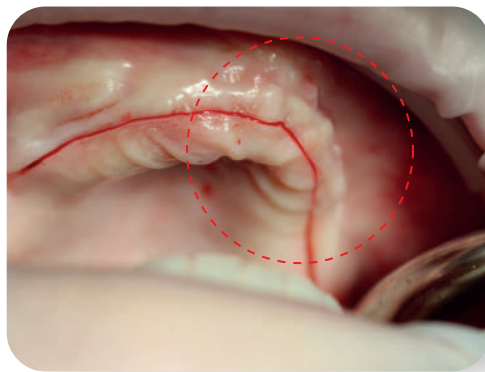

Insición quirúrgica / Surgical cut

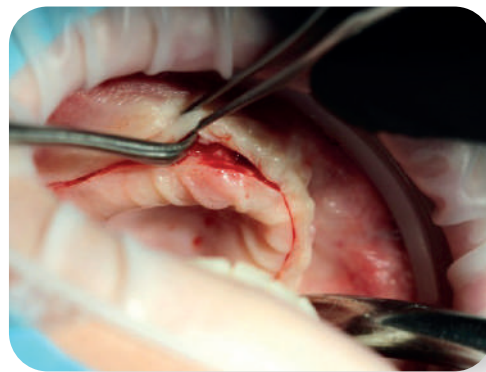


Levantamiento de colgajo / Flap reflection

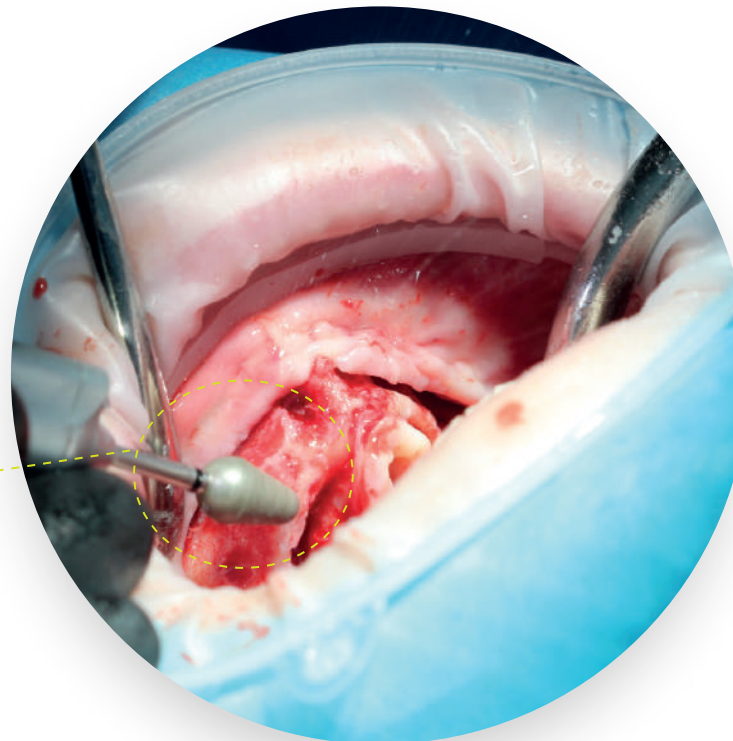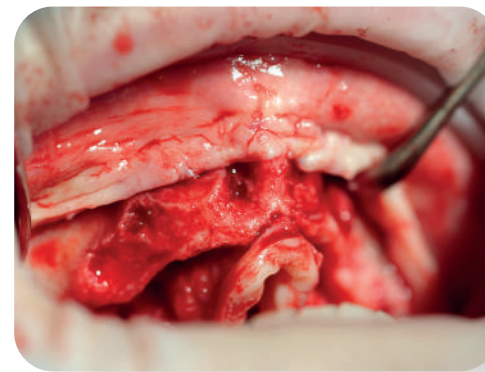

Regularización del reborde alveolar/
Alveolar ridge regularization

CAJA QUIRÚRGICA ZINIC®MT / ZM4MT SURGICAL BOX

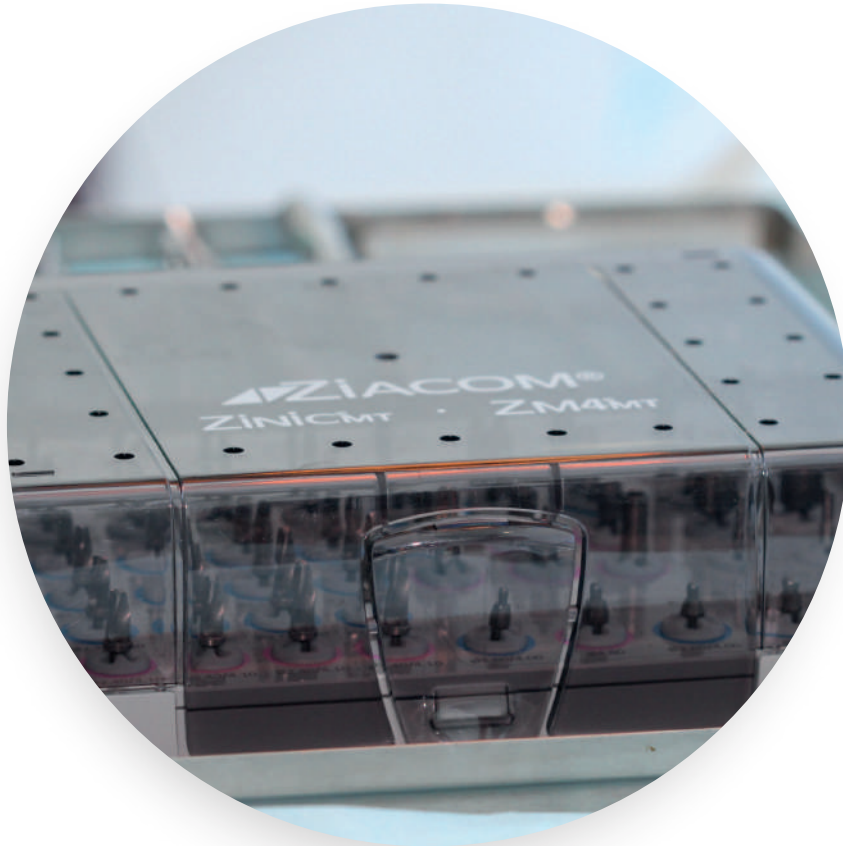

Referencias

Implante	Composición	Referencia
■	Vacía	BOX400
■	Básica CA	BOX400SM
■	Completa CA	BOX400CM

MATERIAL: Radel / Esterilizable a 134°

ATENCIÓN - Vigile que la caja no toque las paredes del autoclave para evitar que se produzcan daños.


References

Implant	Components	Code
■	Empty Box	BOX400
■	Basic CA	BOX400SM
■	Full CA	BOX400CM


MATERIAL: Radel / Sterilizable at 134°

CAUTION - Ensure that the box does not touch the walls of the autoclave to prevent damage.




SECUENCIA DE FRESADO / SURGICAL DRILLING -----

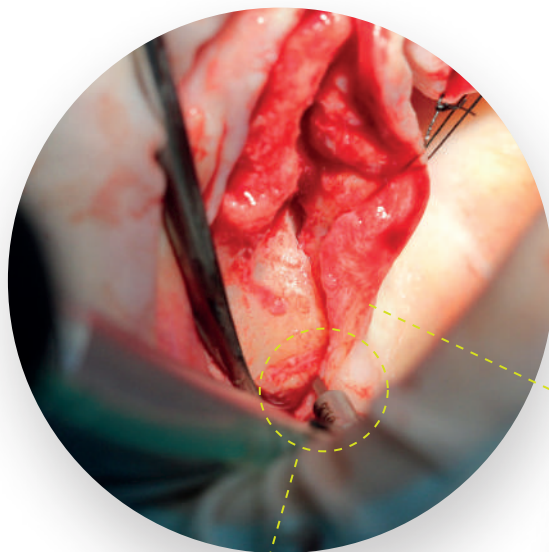

Fresa Lanza / Lance Drill


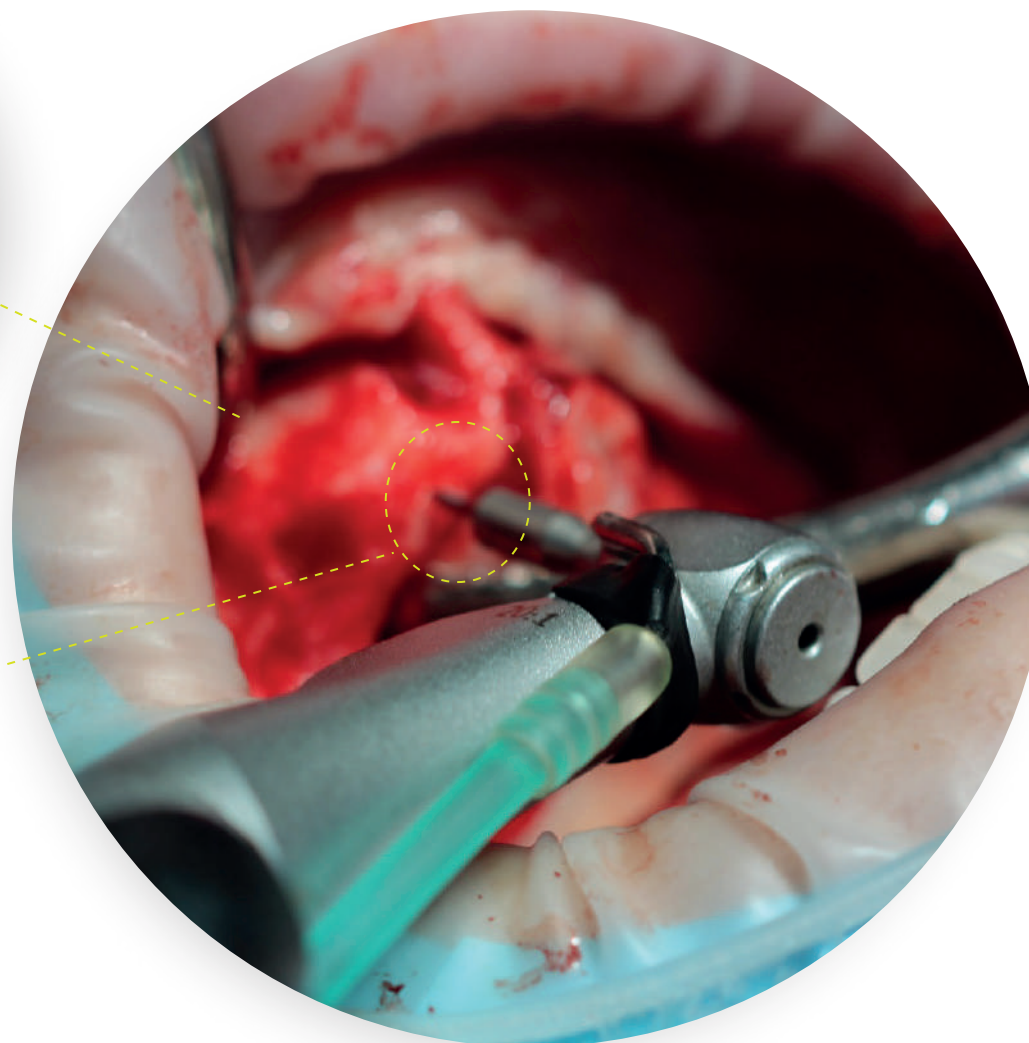


POSTE DE PARALELISMO / PARALLELING PIN

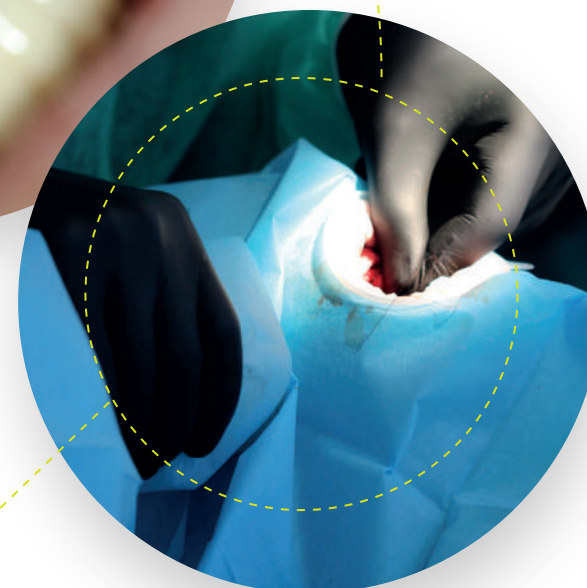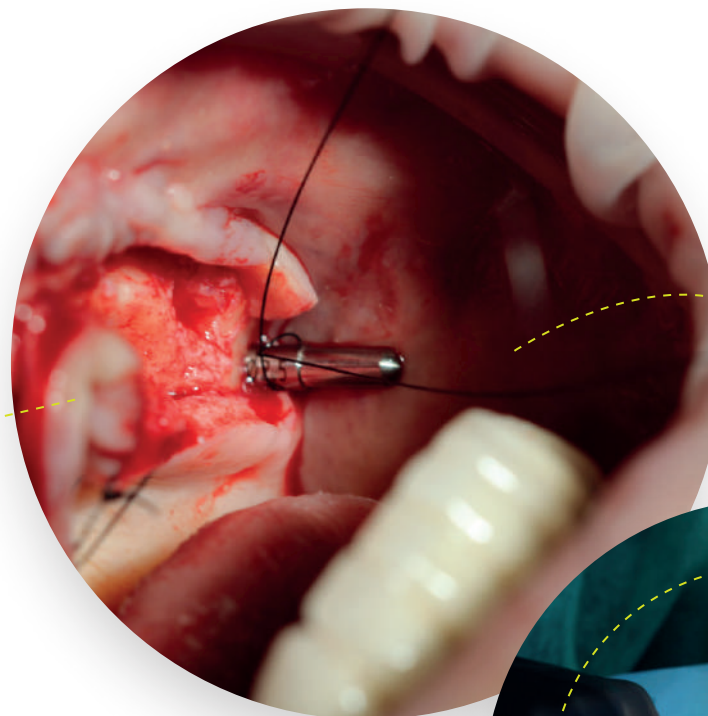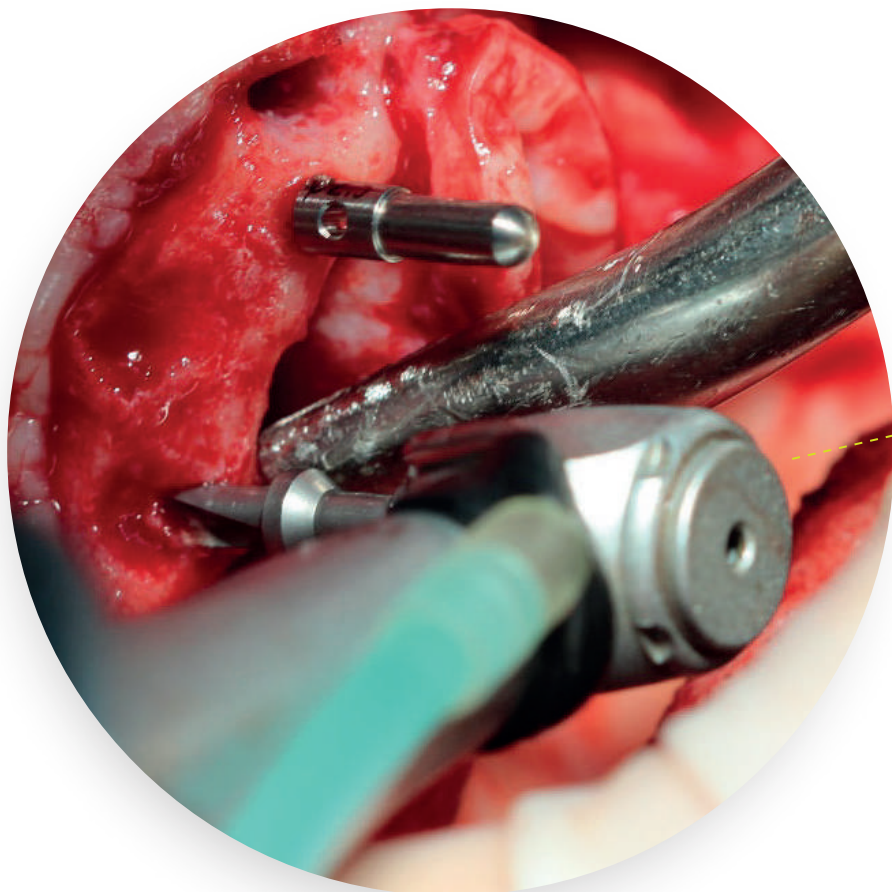


Radiografía periapical de control
/Periapical x-ray

POSTE DE PARALELISMO / PARALLELING PIN

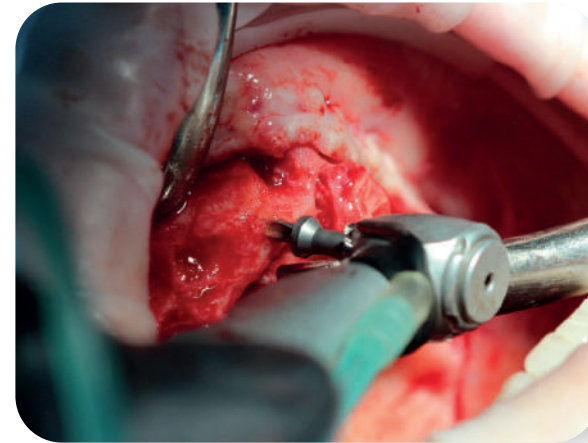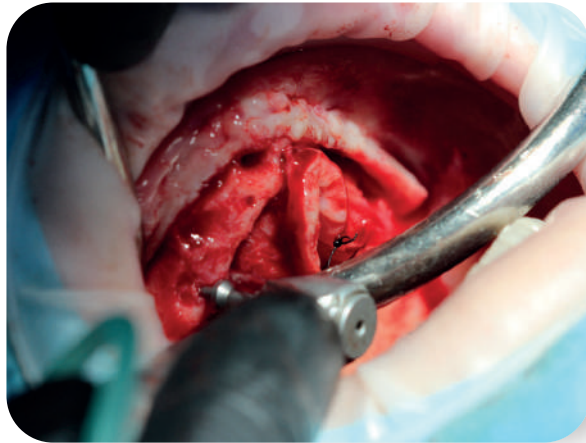

**INSERCIÓN DE IMPLANTE CON CONTRA ÁNGULO /
CONTRA-ANGLE IMPLANT PLACEMENT**

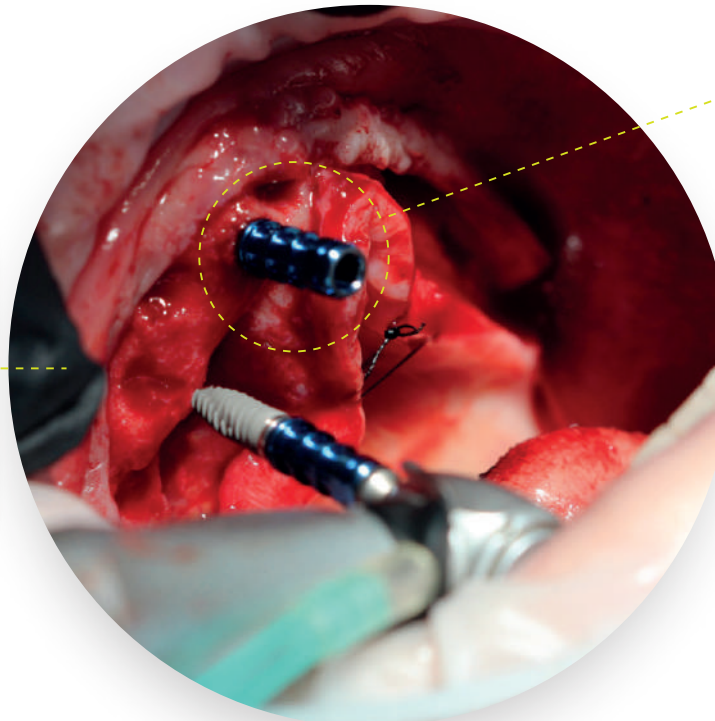


incluido:
**Mount
ZPlus**

- Multifunción:
- Portaimplante
 - Pilar de impresión
 - Pilar provisional


- Uses:
- Mount
 - Impression transfer
 - Provisional abutment




Toma de hueso del fresado
/Bone collected from drilling

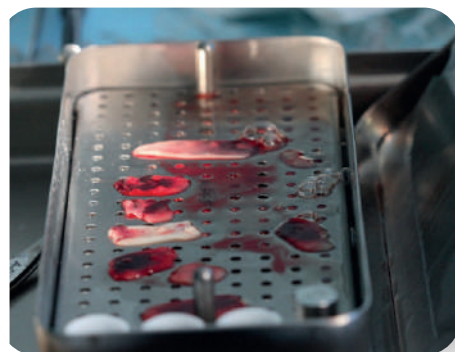


Membranas de PRF/
Prf membranes

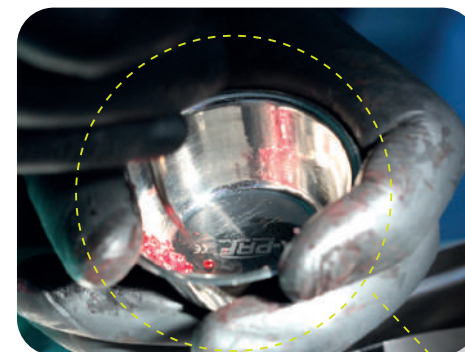

Mezclado de biomaterial
/ Bone grafting mixed


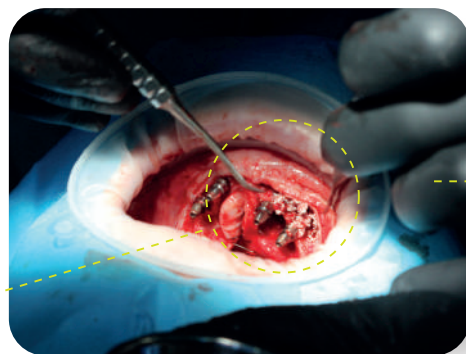


Colocación del injerto óseo
/ Bone grafting placement

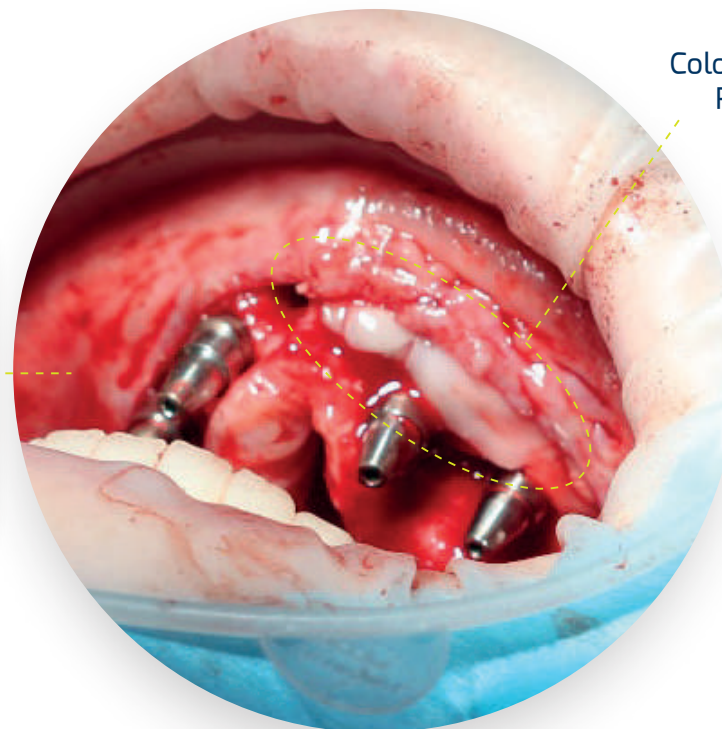

Colocación de membrana de PRF/
PRF membrane placement

SUTURA / SUTURE

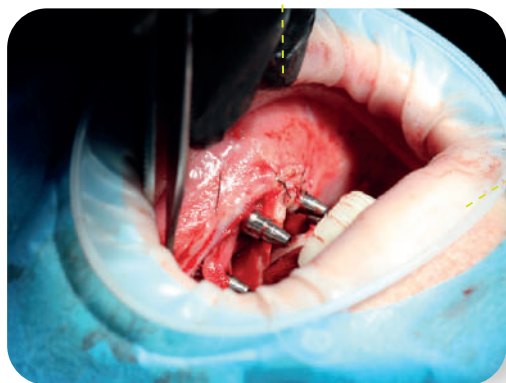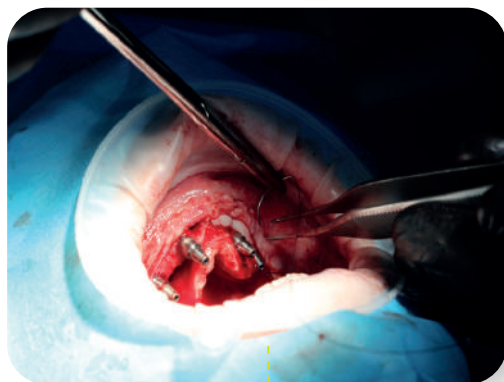

Sutura no reabsorbible/
Non reabsorbible suture

OTROS EQUIPOS/ OTHER EQUIPMENT

Medición ISQ con Ostell IDX / ISQ mesurment with ostell idx



Caja protésica/ Prosthetic box





Ziacom[®]

Together for **health**