

# Caso clínico

# Clinical Case

# 2

Fase Quirúrgica / Surgical Phase

**Colaboración / Collaboration:**

Dr. Juan Manuel Aragonese

Clínica MilaDental - Madrid



- Género: Masculino
- Edad: 36 años
- Tratamiento: Colocación de Implante inmediata elevación de piso de seno maxilar (traumática/ventana lateral) injerto óseo con OsseoBone (Beta fosfato tricálcico) y membrana de Colágeno en zona de 26.
- Tipo y talla de implante: ZinicMT  $\varnothing 4 \times 11,5\text{mm}$

- Gender: Male
- Age: 36 years old
- Treatment: Sinus lift (traumatic/lateral window) with immediate implant placement bone grafting with OsseoBone (Beta-tricalcium phosphate) and collagen membrane in the 26 position.
- Type and implant size: ZinicMT  $\varnothing 4 \times 11,5\text{mm}$



Zinic<sup>®</sup>MT

**ANÁLISIS FACIAL / FACIAL ANALYSIS** -----



Análisis de sonrisa / Smile analysis

**EVALUACIÓN INTRABUCAL / CLINICAL EVALUATION** -----


**EVALUACIÓN INTRABUCAL / CLINICAL EVALUATION** -----




**EVALUACIÓN INTRABUCAL / CLINICAL EVALUATION** -----



ORTOPANTOMOGRAFÍA / PANORAMIC RX

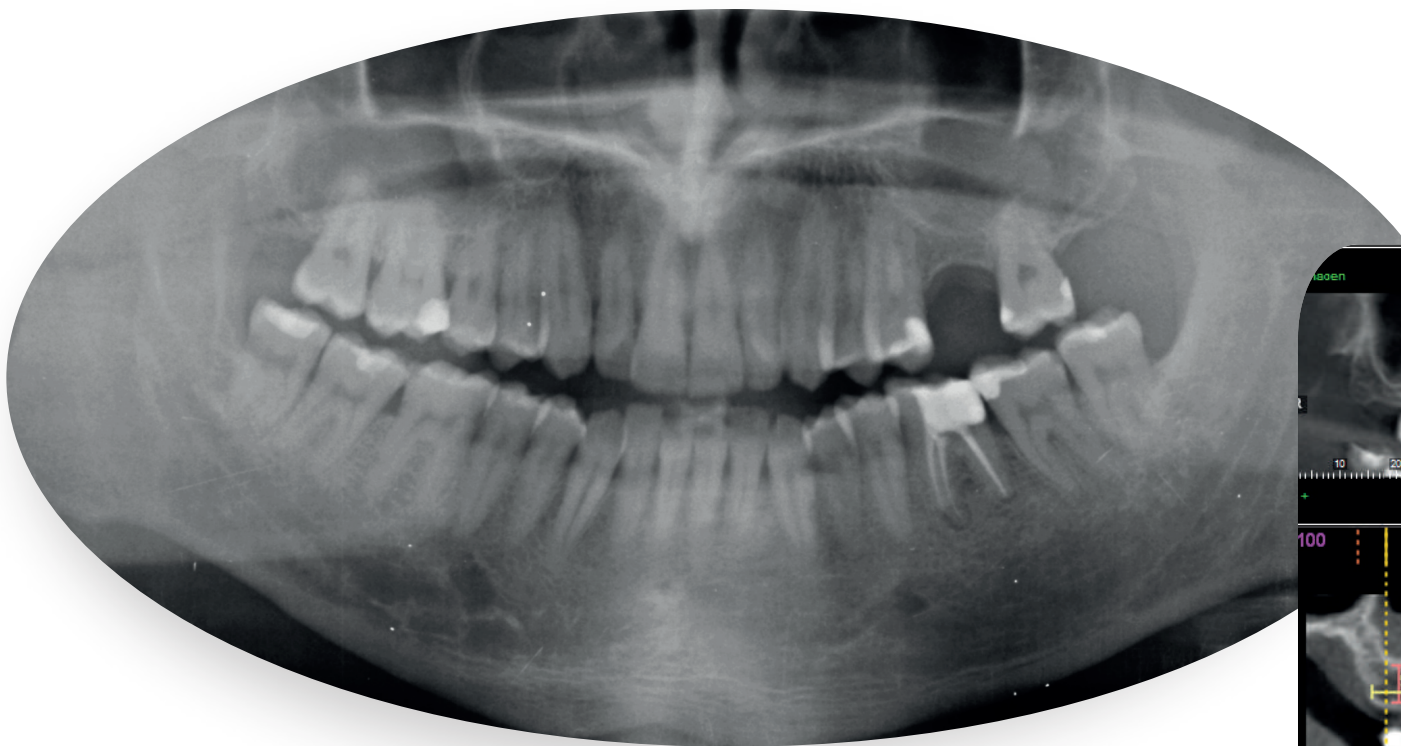


CBTC CORTE AXIAL / CBCT AXIAL SECTION

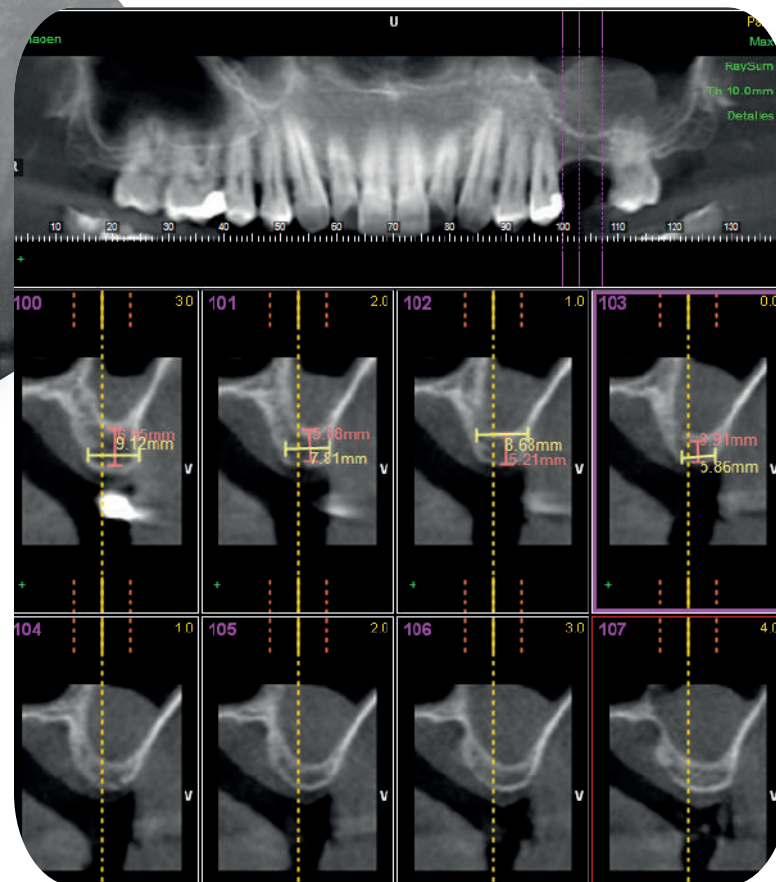



Colocación de implante con inmediata elevación de piso de seno maxilar / Sinus lift with immediate implant placement



Levantamiento de colgajo  
/ Flap reflection

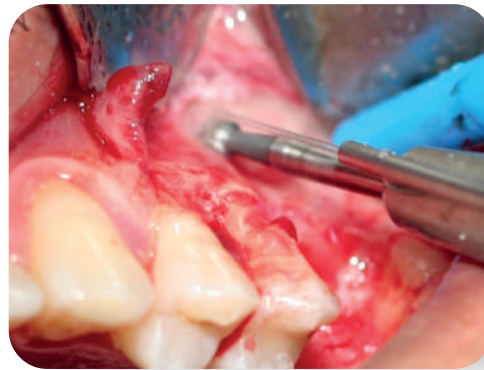

Osteotomía lateral para levantamiento sinusal /  
Lateral window osteotomy for sinus lift

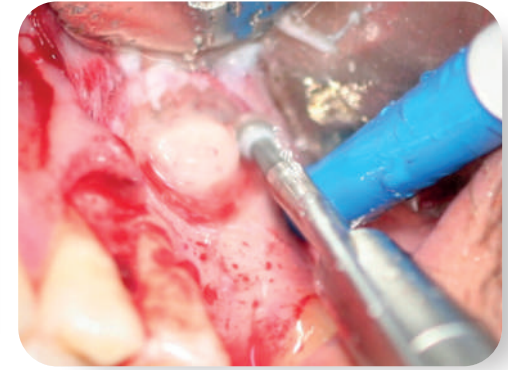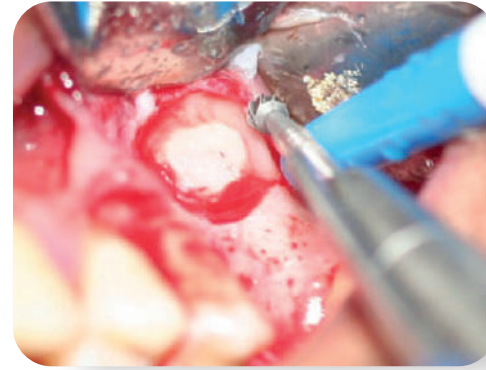


Elevación de la membrana sinusal  
/ Elevation of the schneiderian membrane




Secuencia de fresado  
/ Surgical drilling



Inserción mecánica de implante  
/ Contra-angle implant Placement

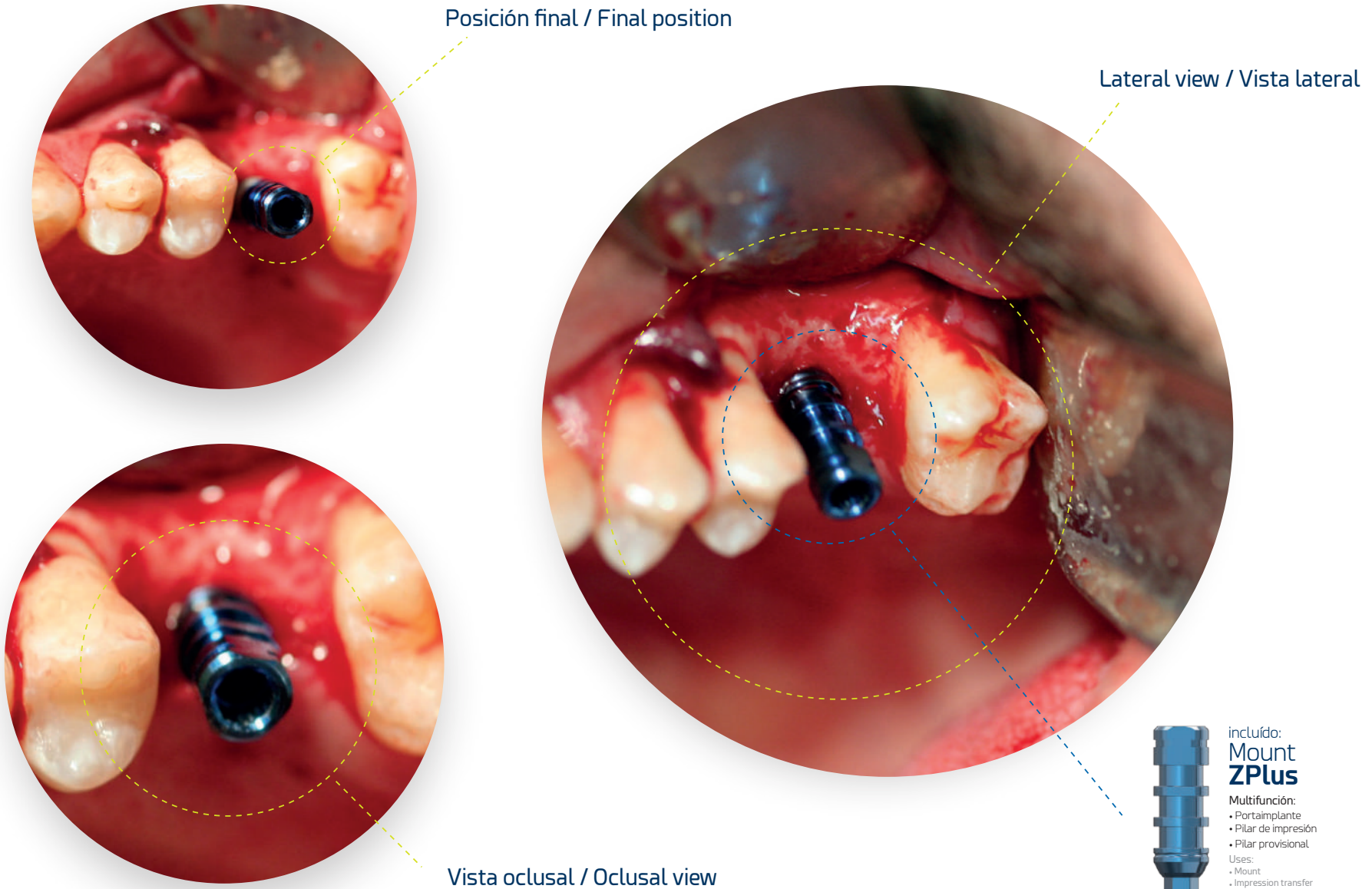

Colocación de implante con inmediata elevación de piso de seno maxilar / Sinus lift with immediate implant placement

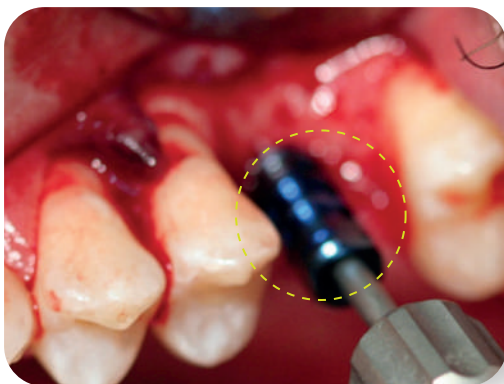

Retiro de tornillo de ZPlus (mount) /  
ZPlus (mount) screw removal



Implante colocado  
/ Implant placed



Injerto oseo  
/ Bone grafting



Membrana de colágeno  
/ Collagen membrane



Sutura / Suture



**Ziacom**<sup>®</sup>

Together for **health**